

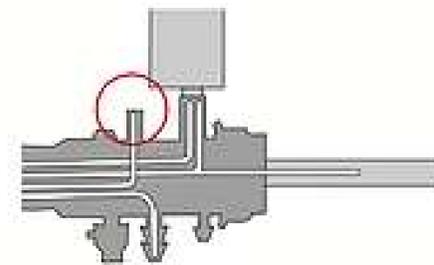


SEINE FUNKTIONSWEISE


Probenahme-Set

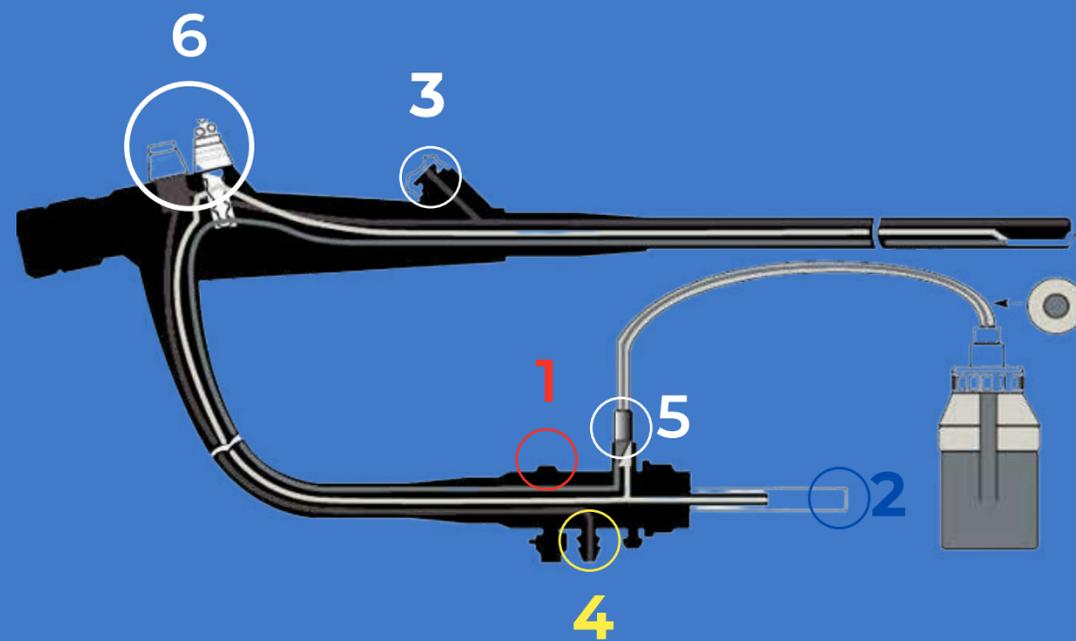


Verbinden Sie den Anschluss 1 mit Teil 1 des Endoskops

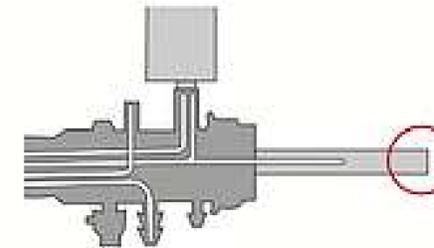



Verbinden Sie den Anschluss 2 mit Teil 2 des Endoskops

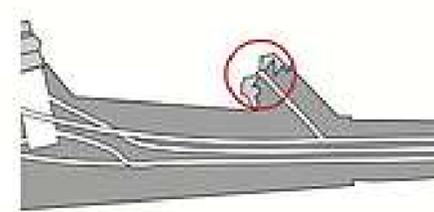

Verbinden Sie den Anschluss 3 mit Teil 3 des Endoskops

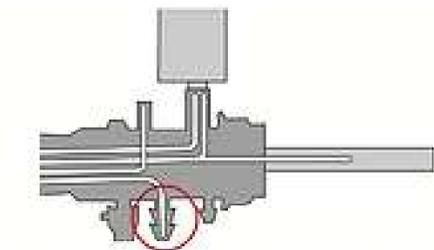


Verbinden Sie den Anschluss 4 mit Teil 4 des Endoskops

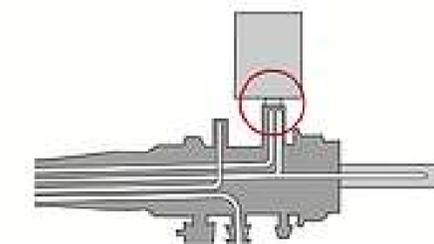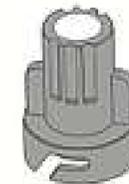

Verbinden Sie den Anschluss 5 mit Teil 5 des Endoskops




x2

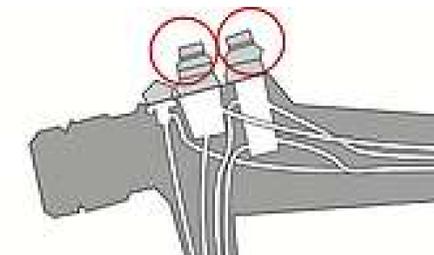


Verbinden Sie den Anschluss 6 mit Teil 6 des Endoskops




Operatorkanal
oder Biopsien-
Kanal

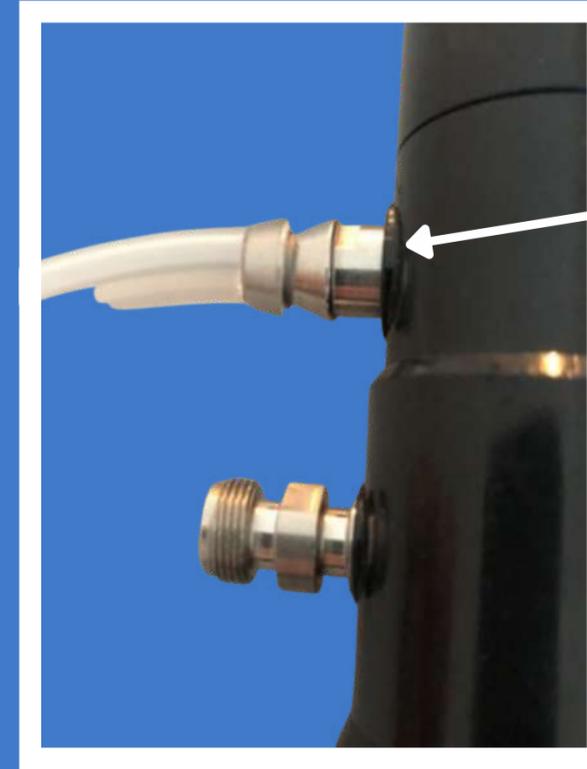

Ansaugkanal Immer in
Tannenbaumform

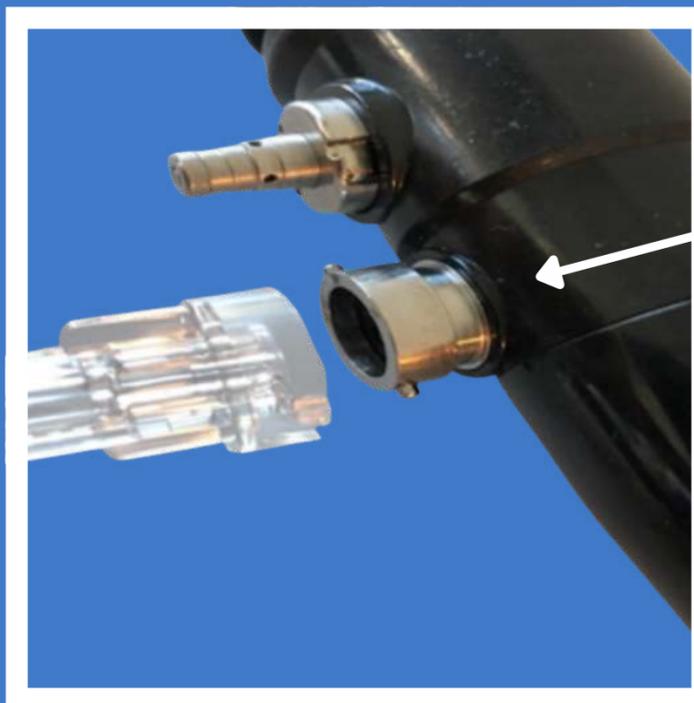

Luft/Wasser-Kanal
Spezieller Anschluss,
schwer zu verstopfen
(Wasserdicht) ohne den
richtigen Anschluss

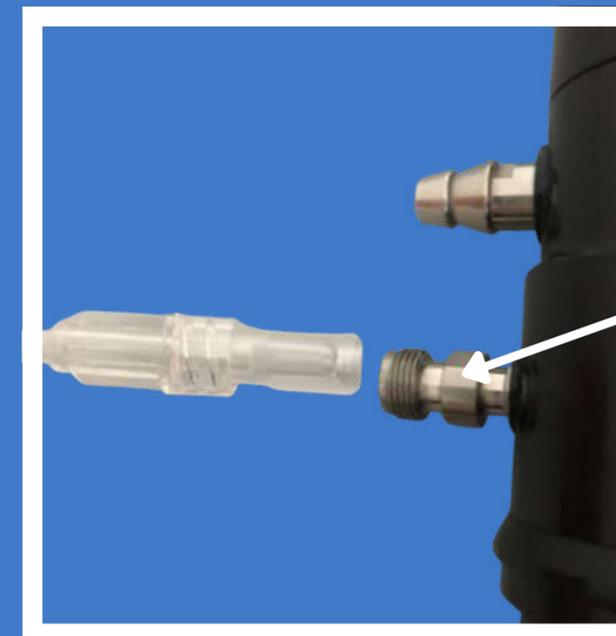

Kanal Water jet
(Wasserstrahl)
Spezifisch je nach
Marken

OLYMPUS®

90111: Olympus® Endoskop-kompatibles Probenentnahme-Set

PENTAX

90222 : Pentax® Endoskop-kompatibles Probenentnahme-Set

FUJIFILM

90333: Fujifilm® 500/600 Serie Endoskop-kompatibles Probenentnahme-Set

90444: Fujifilm® 700 Serie Endoskop-kompatibles Probenentnahme-Set

**UNSERE
REFERENZEN
ENDOCLEAN**